

## OPIS

Żel wybielający z serii YOTUEL® służy do wybielania zębów z dyschromią.  
Produkt należy do klasy IIa wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą 93/42 / CEE (2007/47 / CE) otrzymaną w Hiszpanii z dekretem królewskim 1591/2009.

## KOMPOZYCJA

### YOTUEL SPECIAL 35%

Substancja czynna: nadtlenek wodoru 35%.  
Obejmują również: Aqua, akrylan / kopolimer itakonianu steareth-20, ksylitol, wodorotlenek sodu, fluorek potasu, trietanoloamina, diazolidynylomocznik.

## OPAKOWANIE I SPOSOBY STOSOWANIA

### YOTUEL® SPECIAL 35% KIT:

Opcja podwójnych strzykawk: 4 podwójne strzykawki z 2,5 ml żelu wybielającego 35% i 8 końcówek do mieszania.  
W zestawie także: 1 pojedyncza strzykawka YOTUEL Gingival Protector koferdam ochronny (z 8 końcówkami do aplikacji), 1 YOTUEL pasta do wybielania zębów, 1 instrukcja obsługi, 1 kolornik Zastosuj 2-3 razy przez 15 minut podczas każdej sesji. Tylko do użytku profesjonalnego.

Uwaga: końcówka do mieszania / aplikatory służą tylko do jednego użytku.

## WSKAZANIA

Pojedyncze części lub kilka części dotkniętych dyschromią lub dewitalizacją można wybielić jednocześnie. Dyschromie mogą być spowodowane przez: leki (tetracyklina), fluorozę, plamy związane z jedzeniem, zmiany spowodowane starzeniem się. Wskazane jest zakończenie zabiegu żelem wybielającym co najmniej dwa tygodnie przed założeniem nowych uzupełnień estetycznych. Istniejące uzupełnienia, na które żel wybielający nie działa, mogą nie pasować do jaśniejszego zabarwienia zębów po zabiegu i mogą wymagać wymiany.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy używać produktu na: pacjentkach w ciąży lub podczas karmienia piersią dzieci, palaczach, pijących, pacjentach uczulonych na którykolwiek z składników produktu, zębach z odsoniętą sztyką, pierwotnej i wtórnej nielezionej próchnicy, koronach i mostkach z pięknięciami brzeżnymi lub dziećmi poniżej 13 roku życia.

## SKUTKI UBOCZNE

Może występować przejściowa nadwrażliwość błony śluzowej jamy ustnej lub zębów; objawy te zwykle znikają po zakończeniu lub przerwaniu leczenia.

## OSTRZEŻENIE

YOTUEL® zawiera wysoki procent nadtlenuku, który jest drażniący. Zaleca się obchodzić się z tymi produktami w rękawiczkach i okularach.  
Unikaj kontaktu żelu ze skórą, błonami śluzowymi i oczami. W przypadku kontaktu należy natychmiast przepłukać dotknięte części ciała obficie wodą; zasięgnąć porady lekarza, jeśli dotyczy to oczu. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje. W przypadku połknięcia znacznych ilości żelu wypij dużo wody i zasięgnij porady lekarza.  
Unikaj długotrwałego narażenia produktu na temperatury powyżej 30 ° C.  
Używaj maksymalnie 2 razy w roku.  
Uwaga: produkt zapala się w temperaturze około 204 ° C.

Producent:  
BIO COSMETICS S.L.  
C/ Araquil, 11. 28023 Madrid. ESPAÑA.

Dystrybutor:  
TECH-DENT Sp. zo.o. ul. Kisielewskiego 19, 41-219 Sosnowiec,  
+48 32 269 50 09 POLSKA

Ostatnia aktualizacja 05/2017

biocosmetics laboratories . info@biocosmetics.es · www.yotuel.es

## APLIKACJA

YOTUEL® SPECIAL 35% użycie jest dozwolone tylko w odpowiednich miejscach (centra medyczne i gabinety dentystyczne) i tylko dla lekarzy / dentystów i specjalistów uprawnionych do wykonywania tego zawodu.

Podczas wizyty dentysta przeprowadza analizę historii przypadków pacjenta, określając przydatność do leczenia oraz przepisując zastrzawienia i kontrole względne.

- 1 Ustal kolor zębów pacjenta za pomocą kolornika VITA: B1 - A1 - B2 - D2 - A2 - C1 - C2 - D4 - A3 - D3 - B3 - A3,5 - B4 - C3 - A4 - C4.
- 2 Używając retraktora do ust upewnij się, że usta i zęby są oddzielone.
- 3 Czystość zębów pacjenta przy pomocy pasty YOTUEL z szczoteczką nałożoną na kątnicę o niskiej prędkości.
- 4 Chronić oczy pacjenta pomarańczowymi okularami.
- 5 Wysusz dziąsło przed nałożeniem YOTUEL Gingival Protector na dziąsło w pobliżu wybielonych zębów.
- 6 Utwardzaj koferdam na dziąsłach przez 2 do 4 sekund na ząb za pomocą utwardzającego światła emitującego 480 nm. Upewnij się, że koferdam jest odpowiednio utwardzony.
- 7 Zdejmij osłonę podwójnej strzykawki i załóż końcówkę mieszającą.
- 8 Nałóż żel ze strzykawki do małego pojemnika.
- 9 Nałóż żel na powierzchnię wybielonych zębów. Rozprowadź produkt za pomocą pędzla. Nie nakładaj żelu bezpośrednio ze strzykawki na zęby.
- (2X)\* 10 YOTUEL jest chemicznie aktywowanym produktem
- (3X)\*\* wybielającym, dlatego nie wymaga użycia światła. Jeśli jednak chcesz użyć światła (QTH, łuk plazmowy, laser lub LED), postępuj zgodnie z wytycznymi producenta.
- 11 Po 15 minutach usuń żel za pomocą ssaka.
- 12 Splucz pozostały żel wodą.

\* Powtórz kroki od 8 do 12 dwa razy.

\*\* Aby uzyskać bardziej intensywny wynik, powtórz kroki 8-12 trzy razy.

- 13 Usuń koferdam z dziąsła.
- 14 Zbadaj ostateczny kolor.
- 15 Wyrzucić zużytą końcówkę strzykawki i zamknąć ją dostarczoną nasadką.

Pozostały produkt w strzykawce można przechowywać dla następnego pacjenta. Użyj nowej końcówki mieszającej dla każdego pacjenta.

## PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 ° C do 22 ° C włącznie, z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w lodówce, jeśli jest to możliwe w okresie letnim.  
Data ważności odnosi się do produktu przechowywanego poprawnie. Nie wolno używać produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

## NOTATKI

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Do stosowania wyłącznie w przypadku jamy ustnej, jak opisano w tym arkuszu objaśniającym. Produkt może być używany wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami użytkownika. BIO COSMETICS S.L. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkownika lub zastosowań innych niż te, które są przewidziane w zakresie zastosowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za eksperymentowanie z materiałem do zastosowań, które nie zostały wyraźnie opisane w instrukcji użytkownika.  
Podane tu opisy i data są przybliżone i niewiążące. Treść tego podręcznika użytkownika może ulec zmianie bez powiadomienia.

Przeczytaj instrukcję obsługi

Producent

Data produkcji

Temperatura przechowywania

Numer partii

